

3M™ Kerracontact™ Ag Wundauflage – Anwendungsleitfaden

Worum handelt es sich?

Die Kerracontact Ag Wundauflage ist ein steriler Wundverband zum einmaligen Gebrauch, der bis zu sieben Tage lang gegen eine Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien wirkt.¹ Der Wundverband kann auf trockenen Wunden (durch Befeuchtung) oder bei Vorhandensein von Exsudat verwendet werden, wobei der Transfer von Flüssigkeiten in einen Sekundärverband ermöglicht wird.

Wie funktioniert das Produkt?

Die Wundauflage besteht aus drei Schichten, die alle mit der Ag Oxyalts™ Technologie beschichtet sind. Die beiden äußeren Schichten bestehen aus einem nicht haftenden Polyethylennetz, das einen Polyesterkern umgibt und die Feuchtigkeit in einen Sekundärverband Ihrer Wahl ableitet.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Die Kerracontact Ag Wundauflage ist sowohl für chronische als auch für akute Wunden geeignet. Sie ist für die Anwendung bei Dekubitus, Beinulzera, diabetischen Fußulzera, Verbrennungen zweiten Grades und Transplantationsstellen indiziert. Der Verband kann bei debridierten und transplantierten Wunden verwendet werden und sollte je nach Risikofaktor(en) des Patienten bei der Entwicklung einer Infektion oder einer klinischen Diagnose der Infektion ausgewählt werden.

Anwendung


Vorbereitung der Wunde:

Bereiten Sie die Wunde gemäß dem entsprechenden Wundversorgungsprotokoll vor.

Auswahl des Verbandes:

Wählen Sie eine Abmessung der Kerracontact Wundauflage Ag, die etwas größer als die Wunde ist.

Vorbereitung

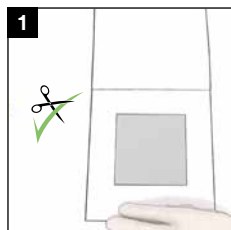


- 1 Die Kerracontact Ag Wundauflage nach Bedarf auf die Größe und Form der Wunde zuschneiden.
- 2 Sie können den Verband am Wundrand überlappen lassen, um sicherzustellen, dass der Verband auf der gesamten Wunde wirksam ist.

Applikation



- 1 Legen Sie die Kerracontact Ag Wundauflage vorsichtig auf die Wunde, wobei beide Seiten des Verbandes auf die Wunde gelegt werden können.
- 2 Wenn sich der Wundzustand verbessert und die Exsudatmenge abnimmt, befeuchten Sie den Verband vor dem Anlegen mit sterilem Wasser. Bei trockenen Wunden befeuchten Sie den Verband vor dem Anlegen mit sterilem Wasser.

Applikation eines Sekundärverbands

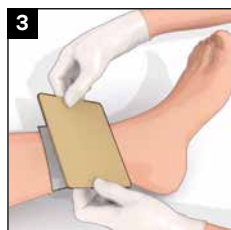

Wählen Sie je nach Exsudatmenge einen geeigneten Sekundärverband, z. B. 3M™ Tegaderm™ Foam Schaumverband oder 3M™ Kerramax Care™ superabsorbierende Wundauflage aus.

Wechsel und Entfernung von Verbänden





Entfernen Sie den Verband vorsichtig vom Wundgrund und entsorgen Sie diesen. Wenn die Wunde trocken erscheint, tränken Sie den Verband vor dem Entfernen mit steriler Kochsalzlösung.

Häufigkeit der Applikation

Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt vom Zustand der Wunde und dem Ausmaß der Exsudation ab. Die Kerracontact Ag Wundauflage ist erneut zu applizieren, wenn der Sekundärverband seine Absorptionskapazität erreicht hat. Die Kerracontact Ag Wundauflage kann bis zu sieben Tage am Körper verbleiben.

Hinweis: Verwenden Sie die Kerracontact Ag Wundauflage gemäß den lokalen Richtlinien zur antimikrobiellen Behandlung mit Silber und überprüfen Sie die Wunde nach zwei Wochen auf die Wirksamkeit der Anwendung.

3M™ Kerracontact™ Ag Wundauflage – Bestellinformationen

Größe	Stück pro Packung	Art.-Nr.	 PZN	 PZN
5 cm x 5 cm	5	CWL1041	11871488	4801317
10 cm x 12,5 cm	5	CWL1042	11871494	4801323
15 cm x 15 cm	5	CWL1043	11871519	4801346
20 cm x 40 cm	5	CWL1044	11871531	4801352

1 Wardle D. CHC-R629 Zusammenfassung der Kerracontact Ag Haltbarkeitsstudien. Crawford Healthcare Ltd. CHC-R629. Knutsford, UK: 2018.

Hinweis: Für diese Produkte und Therapien gibt es spezifische Indikationen, Einschränkungen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte kontaktieren Sie vor der Anwendung einen Arzt und lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Produkt.

© 2022 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M und andere gezeigte Marken sind Marken und/oder eingetragene Markenzeichen. Die unberechtigte Verwendung ist untersagt.

e85644667d8c / EB12-0151



3M Deutschland GmbH
Health Care
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0)186 68 60
medizin-at@mmm.com
www.3Maustria.at/medicalsolutions

Vertrieb in Österreich:
CHEMOMEDICA
Medizintechnik und Arzneimittel
Vertriebsges.m.b.H
1010 Wien, Wipplingerstraße 19
Tel.: +43 (0) 1/533 26 66-0
Fax.: +43 (0) 1/533 26 66-58
info@chemomedica.at
www.chemomedica.at