

ACTISORB™ SILVER 220

ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER

Produktbeschreibung

ACTISORB™ Silver 220 ist eine Wundauflage aus mit Silber imprägnierter Aktivkohle (33 µg/cm²). ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage fördert die Wundheilung durch eine effektive Wundreinigung, indem es Mikroorganismen, welche die Wunden kontaminieren, bindet und immobilisiert. Das Silber bekämpft die Mikroorganismen innerhalb der Wundauflage und reduziert so die Keimbildung in der Wunde bzw. beugt einer möglichen Infektion vor. ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage ist gut verträglich und dank des Prinzips der physikalischen Wundreinigung frei von Nebenwirkungen sowie der Bildung von Resistenzen, wie dies z.B. bei Antibiotika der Fall sein kann.

Da ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage gleichzeitig Wundgerüche neutralisiert, erhöht sich die Lebensqualität von Patient und Anwender.

Indikationen

ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage eignet sich als erste therapeutische Maßnahme bei der Behandlung chronischer Wunden. Es ist für durchbrechende Karzinome, ulzerierende, traumatische und Operationswunden indiziert, bei denen eine bakterielle Verunreinigung, Infektion und/oder ein übler Wundgeruch behandelt werden muss.

Vorsichtsmaßnahmen

Kliniker/medizinische Fachkräfte sollten wissen, dass zu einer langfristigen und wiederholten Anwendung von silberhaltigen Verbänden – insbesondere bei Kindern und Neugeborenen – nur sehr begrenzte Daten vorliegen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Wundvorbereitung

Zunächst muss trockenes, nekrotisches Gewebe durch chirurgisches, enzymatisches oder autolytisches Debridement entfernt werden.

Anwendung

- Vor der Anwendung kann ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage mit Kochsalzlösung oder Ringerlösung angefeuchtet werden.
- Die adsorbierende Eigenschaft von ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage ist am wirksamsten, wenn die Wundauflage in direktem Kontakt zur Wunde steht.
- ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage kann beidseitig angewendet werden.
- ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage kann problemlos in tiefe Wunden tamponiert werden.
- Die glatte Polyamid-Umhüllung gewährleistet bei den meisten Wunden ein verklebungsfreies Entfernen des Verbandes.

- Bei Bedarf kann ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage auf einer nichthaftenden Wundauflage platziert werden. Hierbei ist zu beachten, daß der Wirkmechanismus von ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage nicht durch überschüssige Salben oder Fette beeinträchtigt wird.
- Je nach Exsudationsgrad kann ein absorbierender Sekundärverband auf das ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage aufgelegt werden.
- Die Auflage sollte so fixiert werden, wie es für die Indikation am sinnvollsten erscheint.
- Der Verbandwechsel sollte unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden.

Verbandwechsel



ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage kann in Abhängigkeit vom Grad der Exudation bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben, während der absorbierende Sekundärverband bei Bedarf gewechselt werden kann. Zu Beginn der Behandlung muß ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage u.U. alle 24 Stunden gewechselt werden.

Bitte beachten: ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage sollte nicht zugeschnitten werden, da sonst Kohlepartikel in die Wunden gelangen und diese verfärben können.

Nicht wieder verwenden.

Nicht resterilisieren.

Nicht anwenden wenn Verpackung beschädigt ist.

“Verwendbar bis“- siehe Aufdruck auf der Verpackung.

DE AUF DEM ETIKETT VERWENDETE SYMBOLE



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nicht wiederverwenden (Einmalgebrauch).



Nicht erneut sterilisieren.



Durch Bestrahlung sterilisiert.



Gebrauchsinformation beachten.



CE-Zeichen und Kennnummer der zuständigen Stelle.



Chargennummer.



Verwendbar bis.



Katalognummer.



Hersteller.



Vorsicht.

518301S.d
2018-05

©2018 Systagenix Wound Management Limited, Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, UK

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information may exist for Systagenix, Crawford and KCI (Acelity companies) products. Please consult a healthcare provider and product instructions for use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.

Copyright 2019 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. Unless otherwise noted, all trademarks designated herein are proprietary to KCI Licensing, Inc., Systagenix Wound Management, Ltd., or Crawford Healthcare, Ltd. (06/19)